

 <p>Carlo Poma</p> <p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Mantova</p>	<p>MODALITA' DI PRELIEVO E CONSERVAZIONE URINE DA CATETERE VESCICALE PER URINOCOLTURA</p> <p><i>SMeL – Servizio Medicina del Laboratorio</i></p>	<p>IO04UE</p> <p>Data 11/03/2019 Rev.2</p> <p>Pagina 1 di 1</p>
---	---	---

**MODALITA' DI RACCOLTA DELLE URINE
PER ESAME MICROBIOLOGICO
(URINOCOLTURA)
Urine da catetere singolo**

DISPOSITIVO DI RACCOLTA: contenitore sterile

- 1) Lavarsi le mani con acqua e sapone, asciugarle con cura ed indossare guanti non sterili.
- 2) Verificare la presenza del globo vescicale.
- 3) Lavare accuratamente con acqua e sapone la zona uretrale, sciacquare con acqua ed asciugare.
- 4) Introdurre sterilmente il catetere dopo aver indossato guanti sterili.
- 5) Lasciare defluire la prima parte dell'urina, eliminandola in un contenitore destinato allo scarto e procedere successivamente alla raccolta della seconda parte in un contenitore sterile.
- 6) Verificare la chiusura ermetica.
- 7) Consegnare il campione in Laboratorio nel più breve tempo possibile o conservare il campione in frigorifero fino al momento della consegna (massimo 12 ore).

**N.B.:I campioni debbono essere prelevati preferibilmente al mattino o
3 ore dopo l'ultima minzione**

NOTA: il contenitore può essere ritirato presso i Punti Prelievi.

Il Laboratorio accetta anche contenitori reperiti altrove purché idonei.

LA DIREZIONE