

**LOTTO 1 – CND: Y2127 (INDICATIVO IN QUANTO NON E' DISPOSITIVO MEDICO)**

**SCHEDA TECNICA TETRAPOINT STANDARD 2 – MACCHINA DATTILOBRAILLE MECCANICA PER PAGINE CON FORMATO NON INFERIORE A 22X35CM**



La **Tetrapoint Standard 2** è una macchina dattilobaille meccanica che permette la scrittura in lingua braille.

Come funziona?

Per iniziare ad utilizzare la macchina bisogna rimuoverla insieme al tappetino di gomma dalla valigetta, posizionare la gomma sopra il tavolo e fissare sul piano in gomma la dattilobaille. Il carrello della macchina da scrivere è fissato, per prevenire eventuali urti durante il trasporto, tramite il posizionamento dei margini al centro dello stesso. Il

piano di gomma consente di mantenere la dattilobaille ben ferma sul tavolo durante la scrittura.

Le levette di blocca margine sono poste nella parte superiore del retro della macchina. Premere il margine destro in avanti verso la tastiera e spostarlo verso destra. Spostare il carrello leggermente a sinistra. Dopo lo sblocco di entrambi i margini possibile impostare il margine destro e quello sinistro nella corretta posizione in base alle dimensioni del foglio e al numero di caratteri per riga.

Cosa fa?

La dattilobaille **permette di scrivere a 34 caratteri per riga** e 25 righe per pagina su fogli A4 nella versione con carrello di 23.5 cm, **e fino a 40 caratteri per riga** nella versione con carrello di 27.5 cm. Il campanello avverte 5 caratteri prima del raggiungimento del margine precedentemente fissato. La distanza tra i caratteri braille di 6 mm mentre la distanza tra i punti braille dello stesso carattere di 2.7 mm. Il carattere braille si compone tramite la pressione simultanea dei tasti corrispondenti ai punti da portare in rilievo. Su entrambi i lati del carrello sono posizionati due supporti per il fissaggio del nastro DYMO per la produzione di etichette braille.

Come sono posizionati i tasti?

Per la dattilobaille standard da utilizzare con entrambe le mani la disposizione dei tasti rispetto ai punti braille è la seguente: il testo centrale lungo la barra spaziatrice; dal centro verso la sinistra ci sono i tasti per i punti 1 2 o 3 mentre dal centro verso destra ci sono i tasti per i punti 4 5 o 6.

Sulla parte sinistra della tastiera si trova la levetta di backspace. Premendo questa levetta il carrello si sposta di una posizione verso destra permettendo quindi la correzione e la riscrittura dell'ultimo carattere.